

Proszę o udostępnienie wyników badań laboratoryjnych za pośrednictwem internetowej platformy prezentacji wyników eLaborat poprzez otrzymany kod identyfikujący zlecenie.
Wyniki oraz Regulamin użytkowania serwisu internetowego eLaborat dostępne są stronie internetowej WSSE w Lublinie w zakładce: Co robimy – Badania epidemiologiczne

.....
czytelny podpis zleciodawcy

**- właściwe podkreślić jeżeli dotyczy nieodpłatnych obowiązków badań sanitarno-epidemiologicznych w trybie ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi*

F-05/IR-01/PO-05/DL/OBM wyd. 2 z dnia 17.01.2024

Instrukcja pobierania próbek kału na podłoże transportowe:

1. Otworzyć opakowanie.
2. Trzymając za korek wyjąć patyczek zakończony watą.
3. Zabrudzić wacik kałem (zebrać materiał do badania, gdy jest to możliwe zawierający: krew, śluz, ropę)
- 4. NA WACIKU MUSI BYĆ WIDOCZNY ŚLAD KAŁU.**
5. Otworzyć probówkę z żelem.
6. Wymazówkę z pobraną próbą włożyć do probówki z żelem, następnie szczelnie zamknąć.
7. Podpisać probówkę (nazwisko i imię oraz datę pobranej próby)
8. Materiał do badania przechowywać w chłodnym miejscu.
9. Materiał znajdujący się na podłożu transportowym (w probówce z żelem) dostarczyć do pracowni
3-ego dnia w godzinach 7⁴⁵ – 10⁰⁰

UWAGA: Nie wkładać grudek kału do probówki.