

Sposób przeprowadzenia procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu (Sporal A)

1. Wskaźniki testowe włożyć do co najmniej dwóch największych pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku i umieścić w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego.
2. Przeprowadzić ustalony program sterylizacji;
3. Po zakończeniu procesu sterylizacji wskaźniki dostarczyć do laboratorium w czasie nie dłuższym niż 24 h.
4. Do badanej próbki należy dołączyć wskaźnik kontrolny niepoddany procesowi sterylizacji (tej samej serii, co badany test).
5. Używane testy powinny mieć aktualną datę ważności.
6. Testów nie należy otwierać i wyjmować z opakowania papierowo-foliowego.
7. W czasie transportu wskaźników testowych należy zwrócić uwagę, aby nie doszło do uszkodzenia mechanicznego ani przemoczenia koperty.