

Do wiadomości operatorów i użytkowników mobilnych podnośników pacjenta Winn'Motion
Walencja (Hiszpania), dnia 15 czerwca 2026 r.,

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA (FSN)

Numer referencyjny: FSN_ES01072004

Nazwa handlowa wyrobu medycznego: Mobilne podnośniki pacjenta Winn'Motion 150 i 175

Producent: WINNCARE Spain

Rodzaj działania: Informacja dotycząca bezpieczeństwa

Adres e-mail do dalszych działań w sprawie: winnmotion.vigilance@winnccare.fr

Wyroby, których dotyczy informacja (numery referencyjne i numery seryjne):

WINN'MOTION 150 (numery ref. 102102040, 102102045; od numeru seryjnego SN 170380-001 do numeru seryjnego SN 201705-001 (z wyłączeniem tego numeru) oraz

WINN'MOTION 175 (numery ref. L0900, L090033, L0900-UK; od numeru seryjnego SN 170355-001 do numeru seryjnego SN 201577-001 (z wyłączeniem tego numeru)

Temat: Wymiana wieszaka w podnośnikach pacjenta WINN'MOTION 150 i 175 (wieszaki bez spawów punktowych)

Szanowni Państwo!

Przypominamy o konieczności sprawdzania – podczas **corocznych przeglądów oraz pomiędzy kolejnymi pacjentami** – prawidłowego działania podnośników pacjenta, których dotyczy niniejsza informacja, przed ich ponownym udostępnieniem do użytkowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na **prawidłowe położenie zawlecзки zabezpieczającej**, która zapobiega odkręceniu się nakrętki zabezpieczającej i tym samym może zapobiegać odłączeniu się wieszaka lub belki podwieszającej. Nieprawidłowe położenie zawlecзки może doprowadzić do upadku pacjenta lub mieszkańca w przypadku odłączenia się wieszaka lub belki podwieszającej.

Kontrola wizualna polega na sprawdzeniu, czy zawlecзка znajduje się prawidłowo w otworze nakrętki zabezpieczającej, zgodnie z poniższymi zaleceniami:



Pomimo zapisów zawartych w instrukcji użytkowania w marcu 2026 r. odnotowano incydent. Nie spowodował on poważnych konsekwencji dla pacjenta. W związku z powyższym firma WINNCARE Spain, jako producent, podjęła decyzję o wymianie wszystkich wieszaków w podnośnikach pacjenta objętych potencjalną wadą. Firma WINNCARE pozostaje do Państwa dyspozycji pod adresem winnmotion.vigilance@winnccare.fr w celu ustalenia szczegółów dotyczących wymiany wieszaków.

Prosimy o odesłanie wypełnionego Załącznika 1 po otrzymaniu niniejszej informacji dotyczącej bezpieczeństwa (FSN) oraz po zidentyfikowaniu wyrobów nią objętych. Załącznik 3 należy odesłać do naszej firmy po jego wypełnieniu oraz po wymianie wieszaków w podnośnikach pacjenta objętych niniejszą informacją.

Przywiązujemy szczególną wagę do jakości i bezpieczeństwa naszych produktów. Stanowi to nasz najwyższy priorytet. Dziękujemy za zaufanie i pozostajemy do dyspozycji w przypadku pytań.

Informacja została przekazana do URPL.

Z poważaniem

Fernando ALABARDA
Kierownik ds. jakości i spraw regulacyjnych
WINNCARE Spain

Julien LE GUILLOUX
Kierownik ds. regulacyjnych
WINNCARE

Załącznik 1 – Formularz odpowiedzi klienta

Informacje o produkcie



WINNCARE Spain – 37B Ctra. Masia del Juez – 46909 Torrent (Valencia) – Spain

Numer referencyjny FSN	FSN_ES01072004
Data FSN	15 czerwca 2026 r.
Numer referencyjny produktu	
Numery seryjne	

Dane klienta/dystrybutora (PSDM)

Numer klienta	
Nazwa podmiotu	
Adres	
Imię i nazwisko osoby kontaktowej	
Stanowisko lub funkcja	
Numer telefonu	
E-mail	

Działania podjęte przez dystrybutora (PSDM)

(Zaznaczyć pole w lewej kolumnie)

<input type="checkbox"/>	Zapoznałem(-am) się i zrozumiałem(-am) niniejszą informację dotyczącą bezpieczeństwa.
<input type="checkbox"/>	Zobowiązuję się do wykonania wymaganego działania, zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej informacji dotyczącej bezpieczeństwa (wymiana wieszaków w podnośnikach pacjenta Winn'Motion, które zakupiłem(-am)).
<input type="checkbox"/>	Nie posiadam już zakupionego przeze mnie podnośnika Winn'Motion. Proszę podać numery seryjne wyrobów, których dotyczy niniejsza informacja:


Zatwierdzenie i akceptacja

Data	
Nazwisko i imię	
Podpis	
Pieczętka firmowa	

➔ Formularz odpowiedzi klienta należy odesłać na adres: winnmotion.vigilance@winnicare.fr


Załącznik 2 – Identyfikacja podnośników pacjenta Winn'Motion objętych informacją



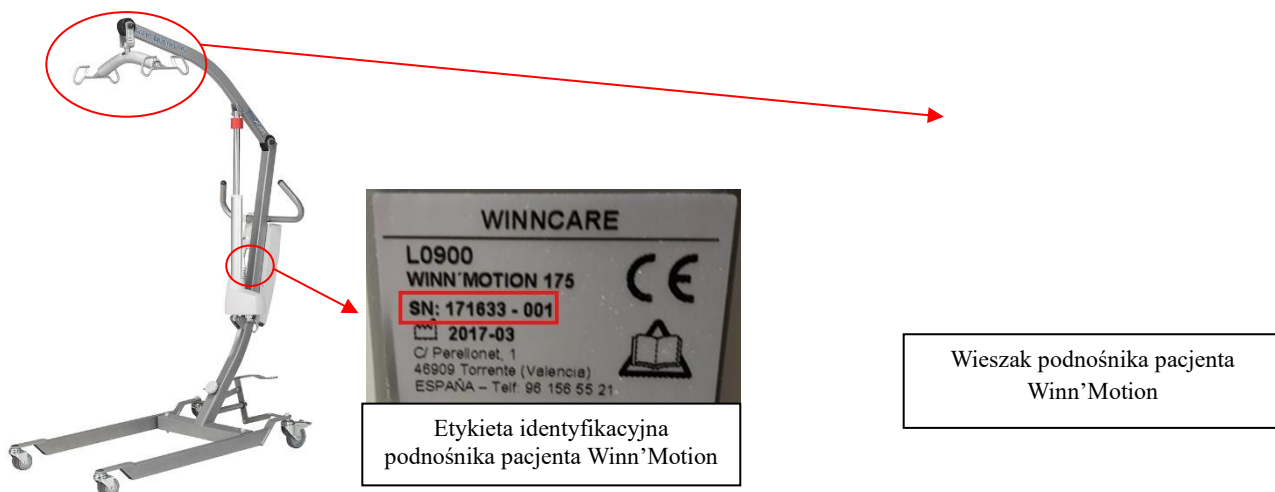


1 – Identyfikacja na podstawie numeru seryjnego

Przykład obok: Numer 171633 podnośnika Winn'Motion 175 oznacza wyrób, którego numer seryjny mieści się w zakresie od 170355 do 201577 – w związku z czym podnośnik pacjenta jest objęty wymianą wieszaka.

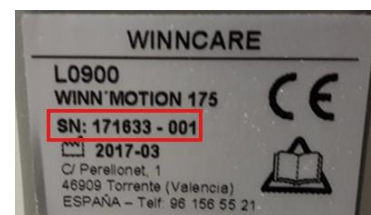

2 – Identyfikacja na podstawie nakrętki zabezpieczającej

Podnośniki pacjenta Winn'Motion objęte niniejszą informacją są wyposażone w wieszak z zawleczką zabezpieczającą oraz mają żółte oznaczenie.

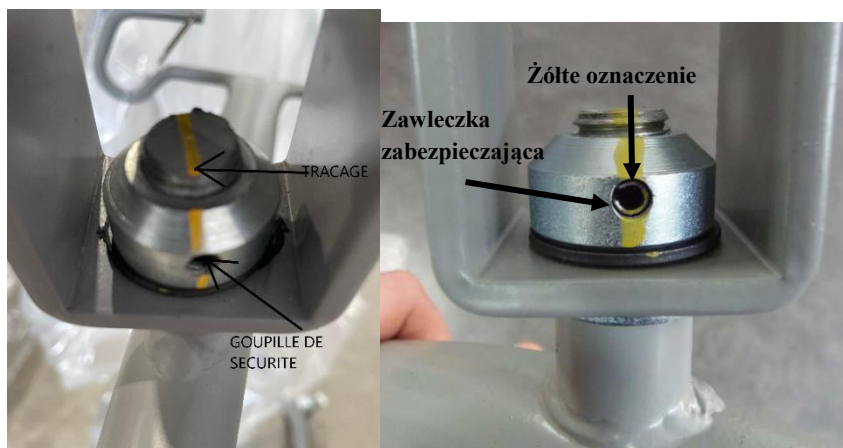

3 – Wyroby nieobjęte niniejszą informacją

Wieszak wyposażony we wkręt dociskowy
Oraz brak żółtego oznaczenia



Wieszak wyposażony w czarną zaślepkę



