

Badania skuteczności procesów sterylizacji

Instrukcja wykonania procesu kontroli sterylizacji

Sposób wykonania kontroli biologicznej procesu sterylizacji przy użyciu testów Sporal:

1. Wyjąć z opakowania foliowego torebki papierowej z krążkami "Sporal S" i umieścić w najtrudniej dostępnych miejscach załadunku sterylizatora.
Uwaga!
Nie odpakowywać krążków "Sporal S" z papierowej osłonki.
2. Próbkę opisać podając miejsce ekspozycji.
3. Przeprowadzić proces sterylizacji.
4. Po zakończeniu procesu sterylizacji wyjąć wskaźniki biologiczne, zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym i kontaminacją oraz dostarczyć do laboratorium wraz z wypełnionym zleceniem na badanie w czasie do 24 godzin od zakończenia sterylizacji.

Sposób wykonania kontroli biologicznej procesu sterylizacji przy użyciu wskaźników biologicznych typu 3M, ATTEST, BROWN, SporView.

1. Umieścić wskaźniki biologiczne w najtrudniej dostępnych miejscach załadunku autoklawu, zabezpieczyć przed zgnieceniem.
2. Przeprowadzić proces sterylizacji.
3. Po zakończeniu procesu sterylizacji wyjąć wskaźniki biologiczne i upewnić się, że wskaźnik chemiczny wydrukowany na etykiecie zmienił kolor.
4. Próbkę opisać podając miejsce ekspozycji.
5. Zabezpieczyć wskaźniki przed uszkodzeniem mechanicznym i dostarczyć do PSSE w Rykach w ciągu 2 godzin po zakończeniu ekspozycji.
Jeżeli wskaźników nie można dostarczyć w tym czasie, należy je przechowywać w lodówce i przekazać do PSSE w Rykach w czasie do 12 godzin po ekspozycji **w wyznaczonym przez pracownika dniu.**

Przed wykonaniem testu należy ustalić termin dostarczenia do PSSE w Rykach z pracownikiem – pokój nr 4

1. Opłatę za badanie skuteczności procesów sterylizacji w kwocie **77 zł** należy wpłacić na konto Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie ul. Pielęgniarek 6
Nr konta : NBP **58 1010 1339 0098 0122 3100 0000**
W TYTULE PRZELEWU: opłata za badanie skuteczności procesów sterylizacji

W przypadku gdy wymagana jest faktury za badania należy ten fakt zaznaczyć w tytule przelewu i podać dane do wystawienia faktury.

Opłatę za **transport** badań skuteczności procesów sterylizacji w kwocie **22 zł** należy wpłacić na konto

70 1010 1339 0007 3622 3100 0000

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rykach ul. Poniatowskiego 2, 08-500 Ryki

2. Testy przyjmowane po okazaniu dowodów wpłaty

Razem z próbami należy dostarczyć dokument potwierdzający płatność (wydruk w przypadku przelewu internetowego)

3. Wyniki badań – dostępne są w formie elektronicznej (przez 90 dni od daty badania)

<https://kl961.elaborat.marcel.pl/?page=logowanie&barcodeLogin=true>

Logowanie do systemu

Identyfikator zlecenia
(numer kodu kreskowego)

...

Data urodzenia

1 ▾ 1 ▾ 1910 ▾

Jeżeli chcesz zalogować się używając numeru PESEL, kliknij tutaj: ☐

Zaloguj