

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Głogowie	LABORATORIUM BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH	Nr egzemplarza	01
	INSTRUKCJA POBORU I PRZESYŁANIA KAŁU DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH	Nr wydania	09
		Data wydania	21.01.2026r.
		Strona/stron	1/5
	LAB/IPP-02		

	Opracował	Zatwierdził
Imię i nazwisko	Danuta Dmochowska	Danuta Dmochowska
Data	21.01.2026 r.	21.01.2026 r.
Podpis		
Obowiązuje od: 21.01.2026 r.		

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Głogowie	LABORATORIUM BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH	Nr egzemplarza	01
	INSTRUKCJA POBORU I PRZESYŁANIA KAŁU DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH	Nr wydania	09
		Data wydania	21.01.2026r.
		Strona/stron	2/5
	LAB/IPP-02		

I. Próbki kału od OSÓB ZDROWYCH do badań w kierunku nosicielstwa pałeczek z rodzaju *Salmonella* i *Shigella*

(BADANIA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH)

TRYB POSTĘPOWANIA

W punkcie przyjmowania próbek do badań (parter – pok. nr 5) należy pobrać osprzet potrzebny do pobrania materiału do badań. **Osprzet wydawany jest po wcześniejszym dokonaniu przelewu oraz okazaniu wydrukowanego potwierdzenia.**

Przez 3 kolejne dni należy pobierać materiał do badań. **DO BADANIA DOSTARCZYĆ KOMPLET TRZECH PRÓBEK** (każda próbka musi być z innego dnia).

SPOSÓB POBRANIA: (pobranie kału na 3 wymazówki z podłożem transportowym)

- kał oddać do czystego-suchego naczynia (można zastosować papier lub talerz jednorazowego użytku),
- za pomocą jednorazowej wymazówki pobrać grudkę kału /wielkości ziarna grochu/ poprzez włożenie do niego wacika umocowanego na końcu wymazówki i obrócenie go kilkukrotnie w materiale kałowym,
- należy zwrócić uwagę, czy w kale znajduje się: ropa, śluz, krew i głównie z tych miejsc pobrać wymaz z kału, wymazówkę z wyraźnym śladem kału umieścić w dołączonej do niej probówce z podłożem transportowym,
- każda próbka kału musi pochodzić z innego dnia.

Każdą wymazówkę z pobranym materiałem opisać w następujący sposób:

- nazwisko i imię pacjenta,
- data urodzenia,
- data i godzina pobrania próbki
- numer pobrania próbki, np.: I, II lub III,

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Głogowie	LABORATORIUM BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH	Nr egzemplarza	01
	INSTRUKCJA POBORU I PRZESYŁANIA KAŁU DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH	Nr wydania	09
		Data wydania	21.01.2026r.
		Strona/stron	3/5
	LAB/IPP-02		

Pobrane próbki od momentu pobrania należy przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C. Dostarczyć do laboratorium maksymalnie do 72 godzin od momentu pobrania pierwszej próbki. Próbkę transportować do 2 godzin w temperaturze otoczenia.

UWAGA! W przypadku antybiotykoterapii próbki do badań należy pobierać minimum 7 dni po jej zakończeniu.

NIE WOLNO ZAMRAŻAĆ PRÓBEK !

Laboratorium przyjmuje próbki w sterylnych wymazówkach wydanych przez PSSE w Głogowie. Osprzęt do pobierania próbek do badań dostępny jest w pokoju nr 5 (parter). Godziny wydawania pojemników dostępne są na stronie <https://www.gov.pl/web/psse-glogow/laboratorium-badan-mikrobiologicznych>.

II. Próbkę kału od OZDROWIEŃCÓW, NOSICIELI I OSÓB ZE STYCZNOŚCI do badań w kierunku obecności pałeczek z rodzaju *Salmonella* i *Shigella*.

W przypadku ozdrowieńców, nosicieli i osób ze styczności próbki do badań przyjmowane są na podstawie zlecenia wystawionego przez pracownika Sekcji Epidemiologii, który decyduje o terminie, ilości próbek i częstotliwości badań.

SPOSÓB POBRANIA, PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTOWANIA:

opisany w punkcie I niniejszej instrukcji.

III. Próbkę kału od OSÓB CHORYCH do badań w kierunku pałeczek z rodzaju *Salmonella* i *Shigella*.

Próbki kału od osób chorych w kierunku pałeczek *Salmonella* i *Shigella* należy pobierać w okresie objawowym najlepiej przed podaniem leków przeciwdrobnoustrojowych.

SPOSÓB POBRANIA, PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTOWANIA:

opisany w punkcie I niniejszej instrukcji

W przypadku biegunki – pobrać około 5 ml-10 ml kału do sterylnego pojemnika na kał.

Opis pojemnika powinien zawierać następujące informacje

- nazwisko i imię pacjenta,

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Głogowie	LABORATORIUM BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH	Nr egzemplarza	01
	INSTRUKCJA POBORU I PRZESYŁANIA KAŁU DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH	Nr wydania	09
		Data wydania	21.01.2026r.
		Strona/stron	4/5
	LAB/IPP-02		

- datę urodzenia,
- datę i godzinę pobrania próbki

Pobraną próbkę kału dostarczyć do laboratorium do 24 godzin od momentu pobrania. Próbkę transportować do 2 godzin w temperaturze otoczenia.

IV. Kał do badań wirusologicznych.

Próbki kału od osób chorych w kierunku rota- i adenowirusów należy pobierać w okresie objawowym.

Metody pobierania próbki

- Kał oddać do czystego-suchego naczynia (można zastosować papier lub talerz jednorazowego użytku), **nie pobierać bezpośrednio z urządzeń sanitarnych!**,
- za pomocą szpatułki pobrać próbkę kału wielkości orzecha laskowego (w przypadku biegunki – pobrać ok. 5 ml kału).

Pobraną próbkę od momentu pobrania należy przechowywać w temperaturze. od 2°C do 8°C. Dostarczyć do laboratorium maksymalnie do 24 godzin od momentu pobrania próbki. Próbkę transportować do 2 godzin w temperaturze otoczenia.

V. Warunki transportu

Materiał pobrany do badania powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem oraz wpływem czynników zewnętrznych .

Próbki pobrane do badania powinny być transportowane:

- w szczelnie zamkniętych wymazówkach lub szczelnie zamkniętym pojemniku zbiorczym oznakowanym jako „materiał zakaźny”
- w warunkach niezmiennych ich właściwości mających wpływ na wynik badania
- w sposób zabezpieczający bezpieczeństwo osoby transportującej. W przypadku uszkodzenia próbki należy podjąć kroki zapobiegające kontaminacji innych próbek i działania dezynfekujące.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Głogowie	LABORATORIUM BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH	Nr egzemplarza	01
	INSTRUKCJA POBORU I PRZESYŁANIA KAŁU DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH	Nr wydania	09
		Data wydania	21.01.2026r.
		Strona/stron	5/5
	LAB/IPP-02		

W przypadku dostarczenia próbek w sposób uniemożliwiający ich jednoznaczną identyfikację, pobranie niewystarczającej ilości materiału oraz niewłaściwe zabezpieczenie i transport Laboratorium ma prawo odmówić przyjęcia próbek do badania.

4. Rozdzielnik

Nr egz.	Instrukcję otrzymują	Data otrzymania i podpis	Data oddania i podpis
01	p.o. Kierownik Laboratorium Badań Mikrobiologicznych		
02	Sekcja Epidemiologii PSSE w Głogowie		
03	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Górze		
04	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Polkowicach		
05	Egzemplarz prezentacyjny		