

**Szczegółowy sposób pobierania i dostarczenia do badań biologicznych
wskaźników skuteczności procesów sterylizacji (sporal)**

Przyjmowanie biologicznych wskaźników skuteczności procesów sterylizacji przeznaczonych do badania odbywa się zgodnie z harmonogramem w godzinach 08⁰⁰ - 10⁰⁰

Sposób pobrania: Wskaźniki biologiczne należy włożyć do nie mniej niż dwóch największych pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku i umieścić w różnych miejscach komory sterylizacyjnej zwłaszcza tam, gdzie dostęp czynnika sterylizującego może być utrudniony.

Pobieranie próbek obejmuje 3 etapy:

- załadunek testów
- ekspozycję testów
- wyjmowanie testów.

UWAGA Warunkiem przyjęcia wskaźników jest dołączenie testu kontrolnego.

Transport pobranych próbek do laboratorium Pobrane próbki należy dostarczyć do badań w ciągu 24 godzin od przeprowadzenia procesu sterylizacji (posiew wykonywany jest o godzinie 14.00 w dniu przyjęcia Sporal). Testy przed badaniem należy przechowywać w temperaturze 2÷8°C (w przypadku *Bacillus subtilis* zabezpieczyć je przed zawilgoceniem)

Kontrola skuteczności sterylizacji prowadzona powinna być w następujących przypadkach:

- okresowa kontrola, którą każdy użytkownik sterylizatora powinien prowadzić we własnym zakresie z indywidualnie ustaloną częstotliwością;
- podejrzenie o nieprawidłowe działanie sterylizatora;
- remont urządzenia; - wprowadzenie nowego rodzaju załadunku;
- zmiana warunków procesu sterylizacji.

Przy zdawaniu próbek należy dołączyć dokumenty:

- zlecenie wykonania badania biologicznych wskaźników procesu sterylizacji: Sporal S, Sporal A,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
- wypełnione czytelnie i drukowanymi literami skierowanie „ZLECENIE BADANIA OCENY SKUTECZNOŚCI STERYLIZACJI”,
- dowód wpłaty za badanie

UWAGA Warunkiem przyjęcia wskaźników jest uiszczenie opłaty i okazanie dowodu wpłaty przy zdawaniu materiału do badań.

Przed wykonaniem badania należy dokonać wpłaty na konto bankowe.

Nie ma możliwości dokonywania wpłat gotówkowych za wykonane usługi.

Tytuł wpłaty: badanie oceny skuteczności sterylizacji, **numer identyfikacyjny NIP przedsiębiorcy**

Nr konta: NBP O/Szczecin nr 30101015990519982231000000. Koszt badania:

Sporal S – 164,66 zł

Sporal A - 127,66 zł

Zgodnie z art. 106b ust. 5 i ust. 6 Ustawy o VAT, w dniu dokonania wpłaty za usługę (badanie) należy podać w tytule przelewu lub w formie pisemnej swój numer identyfikacyjny NIP. W przypadku braku informacji wskazanej powyżej, faktura będzie wystawiona bez numeru NIP na podmiot dokonujący wpłaty.

Formularz zlecenia wykonania badania biologicznych wskaźników procesu sterylizacji (Sporal A, Sporal S) oraz druk zlecenia badania oceny skuteczności sterylizacji i zgodę na przetwarzanie danych osobowych można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w siedzibie PSSE w Kamieniu Pomorskim.