

Zasady użycia, przechowywania i transportu testów biologicznych do kontroli procesu w komorze dezynfekcyjnej do badań

I. Zasady postępowania z testami:

- Przed użyciem testy (wskaźniki testowe) należy przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła, chroniąc przed zawilgoceniem.
- Przed zastosowaniem należy sprawdzić stan oraz termin ważności testów - uszkodzonych i przeterminowanych wskaźników nie należy używać.
- Niezużyte lub przeterminowane testy należy spalić lub odesłać do laboratorium.

II. Sposób użycia testów:

- Do kontroli jednego urządzenia należy użyć co najmniej czterech wskaźników testowych: trzy testy umieszczone w różnych miejscach komory poddaje się procesowi dezynfekcji. Czwarty test – nie poddany procesowi dezynfekcji - służy jako test kontrolny (kontrola wzrostu bakterii) i należy oznaczyć go literą „K”.
- W przypadku konieczności użycia większej liczby testów do jednego urządzenia należy pozostawić jeden test jako próbkę kontrolną. Pozostałe testy należy oznaczyć w sposób umożliwiający identyfikację miejsca umieszczenia testu w komorze.
- Po zakończeniu procesu dezynfekcji należy wyjąć testy z załadunku i zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem poprzez umieszczenie ich w papierowej torebce, kopercie lub zawinięcie w czystą kartkę papieru.

III. Przechowywanie i transport testów do laboratorium:

- Testy należy dostarczyć do laboratorium w czasie **nie dłuższym niż 24 godziny od zakończenia procesu dezynfekcji**, w temperaturze otoczenia, chroniąc przed zawilgoceniem.
- Do czasu transportu testy należy przechowywać w **temperaturze pokojowej**.
- Do próbek należy dołączyć **dokładnie i czytelnie** wypełnione „Zlecenie na badanie laboratoryjne testów biologicznych do komór dezynfekcyjnych” – F/I/PO/OL/LMiP-04-04-05.

Uwaga. Testy do komór dezynfekcyjnych zostały opisane numerem partii i datą ważności. Dane te należy wpisać w odpowiednim miejscu na zleceniu na badanie.

Formularz zlecenia dostępny jest w Punkcie przyjmowania próbek do badań diagnostycznych od pacjentów oraz na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze.