

UŁOTKA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

Kontrola biologiczna procesu sterylizacji (IO-LAB-11 „Pobieranie i transport materiału do badań mikrobiologicznych” wydanie aktualne):

Przed ekspozycją. Przed ekspozycją przechowywać w temperaturze i wilgotności zalecanej przez producenta testów.

Zmiana koloru wskaźnika chemicznego nie potwierdza prawidłowości procesu sterylizacji i nie zastępuje użycia testu.

- ❓ Zabezpieczyć wskaźniki przed uszkodzeniem w czasie sterylizacji (umieścić w rękawie lub torebce papierowo-foliowej)
- ❓ Testy umieścić z materiałem do sterylizacji. Minimum jeden test **umieścić w miejscu największego obciążenia autoklawu pozostałe rozmieścić** równomiernie / włożyć je do pakietów testowych i umieścić w komorze sterylizatora (półka górna i dolna)
- ❓ .Przeprowadzić wybrany proces sterylizacji.
- ❓ Wyjać wskaźniki z pakietu kontrolnego i opisać (data sterylizacji oraz rozmieszczenie).
- ❓ **UWAGA: Po sterylizacji zawartość testów fiolkowych jest gorąca i pod ciśnieniem. Należy schłodzić je co najmniej 10 minut. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować niebezpieczne pęknięcie ampułki lub szkody wynikające z obłania gorącą cieczą.**
- ❓ Zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem w czasie transportu i dostarczyć do laboratorium wraz z wypełnionym protokołem- zał. 01 do IO-LAB-11 wydanie aktualne.
- ❓ Sporal „S” po ekspozycji zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem dostarczyć do laboratorium w ciągu 24 godzin.
- ❓ Testy fiolkowe do kontroli procesu sterylizacji **parą wodną (np. Attest3M™)** po ekspozycji poddać inkubacji do 2 godz. lub umieścić w chłodziarce (temp.2-8 °C)- czas przechowywania do 7 dni. Niedozwolone jest przechowywanie w temperaturze równej, niższej niż 0 °C. Transportować w temperaturze pokojowej do 25°C.
- ❓ **Nie stosować przeterminowanych testów.**
- ❓ **Dostarczyć do laboratorium równoległe z próbkami badanymi test kontrolny stanowiący kontrolę przechowywania i transportu prze klienta, nie poddany procesowi sterylizacji.**

Jeśli klient zaopatruje się w testy do kontroli sterylizacji indywidualnie, należy dodatkowo dostarczyć jeden wskaźnik nie poddany procesowi sterylizacji jako wskaźnik kontrolny żywotności drobnoustrojów - tej samej serii co testy badane (przy każdej nowej serii).

Przyjmowanie materiału do badania od poniedziałku do środy w godzinach : 8.00 – 12.00

Dokument wynikający z IO-LAB-11,„Pobieranie i transport materiału do badań mikrobiologicznych” - wydanie aktualne

Cennik badań zgodny z Zarządzeniem Dyrektora. PSSE w Kłodzku 5/DYR/23

L.p.	Rodzaj badania	Cena brutto w zł.
1. Badanie wskaźników biologicznych skuteczności procesu sterylizacji		
1a.	Attest 3M™1262	81,00
1b.	Sporal S	

Płatność tylko przelewem na konto: **NBP O/Wrocław 03 1010 1674 0018 6322 3100 0000;**
w tytule przelewu należy podać dane firmy oraz rodzaj badania. Wyniki badań będą wydawane po zaksięgowaniu wpłaty.