

Sposób przeprowadzenia procesu sterylizacji suchym gorącym powietrzem (Sporal S)

1. Wskaźniki testowe włożyć do co najmniej dwóch największych pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku i umieścić w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego.
2. Przeprowadzić ustalony program sterylizacji;
3. Po zakończeniu procesu sterylizacji wskaźniki dostarczyć do laboratorium w czasie nie dłuższym niż 24 h.
4. Do badanej próbki należy dołączyć wskaźnik kontrolny, niepoddany procesowi sterylizacji (tej samej serii co badany test);
5. Wskaźniki testowe należy używać w terminie ważności podanym przez producenta.
6. Wskaźniki ze spalonymi bibułkami zabezpieczającymi nie będą przyjmowane.
7. W czasie transportu wskaźników testowych należy zwrócić uwagę, aby nie doszło do uszkodzenia mechanicznego ani przemoczenia koperty.