

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Głogowie	LABORATORIUM BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH	Nr egzemplarza	01
	INSTRUKCJA POBIERANIA I PRZESYŁANIA AMPULKOWYCH WSKAŹNIKÓW BIOLOGICZNYCH DO KONTROLI SKUTECZNOŚCI PROCESU STERYLIZACJI	Nr wydania	06
		Data wydania	09.06.2025r.
		Strona/stron	1/4
	LAB/IPP-07		

	Opracował	Zatwierdził
Imię i nazwisko	Karolina Kawka	Karolina Kawka
Data	09.06.2025 r.	09.06.2025 r.
Podpis		
Obowiązuje od: 09.06.2024 r.		

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Głogowie	LABORATORIUM BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH	Nr egzemplarza	01
	INSTRUKCJA POBIERANIA I PRZESYŁANIA AMPULKOWYCH WSKAŹNIKÓW BIOLOGICZNYCH DO KONTROLI SKUTECZNOŚCI PROCESU STERYLIZACJI	Nr wydania	06
		Data wydania	09.06.2025r.
		Strona/stron	2/4
	LAB/IPP-07		

1. Tryb postępowania.

Próbki wskaźników biologicznych są wydawane klientom zewnętrznym przez pracownika Laboratorium Badań Mikrobiologicznych (lub innego przeszkolonego pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Głogowie) w pokoju przyjmowania prób do badań (pokój nr 5) w opakowaniu zabezpieczającym przed ich uszkodzeniem, wraz z instrukcją postępowania (załącznik nr 02 do niniejszej instrukcji). Klient każdorazowo potwierdza podpisem ilość pobranych pakietów wskaźników biologicznych oraz to, że otrzymał instrukcję pobierania i przesyłania wskaźników do badania. Podpis składa na załączniku nr 01 do niniejszej instrukcji. Jeden pakiet wskaźników należy wykorzystać do kontroli jednego sterylizatora. Na każdy pakiet wskaźników biologicznych składa się ilość wskaźników wskazana przez klienta (najczęściej dwa) oraz wskaźnik kontrolny, który nie podlega sterylizacji.

2. Metoda poboru.

1. Do badania przyjmowanie są wyłącznie wskaźniki biologiczne wydane przez Laboratorium Badań Mikrobiologicznych PSSE w Głogowie.
2. Do czasu wykonania sterylizacji wskaźniki przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed światłem i wysychaniem.
3. Oznaczyć na wskaźnikach ich umiejscowienie w autoklawie (np. góra, dół lub przód, tył, itp.) oraz opisać wskaźnik kontrolny literą K. **Wskaźnika kontrolnego nie poddawać sterylizacji!!!** Pozostałe wskaźniki umieścić zgodnie z opisem w autoklawie.
4. Przeprowadzić sterylizację zgodnie z instrukcją obsługi producenta sterylizatora.
5. Po sterylizacji zawartość wskaźników jest gorąca i pod ciśnieniem, należy pozwolić im się schłodzić.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Głogowie	LABORATORIUM BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH	Nr egzemplarza	01
	INSTRUKCJA POBIERANIA I PRZESYŁANIA AMPULKOWYCH WSKAŹNIKÓW BIOLOGICZNYCH DO KONTROLI SKUTECZNOŚCI PROCESU STERYLIZACJI	Nr wydania	06
		Data wydania	09.06.2025r.
		Strona/stron	3/4
	LAB/IPP-07		

6. Uzupełnić załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji lub opcjonalnie podać Laboratorium Badań Mikrobiologicznych informacje zawarte w tym załączniku w momencie wypełniania zlecenia.

3. Przesyłanie materiału do laboratorium

- Po zakończeniu procesu sterylizacji wskaźniki ampulkowe powinny być dostarczone do laboratorium w jak najkrótszym czasie, maksymalnie w ciągu 48 godzin od momentu zakończenia procesu sterylizacji. Do czasu dostarczenia testów do laboratorium zaleca się je przechowywać w temperaturze (2-8) °C.
- Dni i godziny przyjmowania wskaźników do badania dostępne są na stronie internetowej <https://www.gov.pl/web/psse-glogow/laboratorium-badan-mikrobiologicznych>.
- W dni poprzedzające dni ustawowo wolne od pracy wskaźników do badań nie przyjmujemy.**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Głogowie	LABORATORIUM BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH	Nr egzemplarza	01
	INSTRUKCJA POBIERANIA I PRZESYŁANIA AMPULKOWYCH WSKAŹNIKÓW BIOLOGICZNYCH DO KONTROLI SKUTECZNOŚCI PROCESU STERYLIZACJI	Nr wydania	06
		Data wydania	09.06.2025r.
		Strona/stron	4/4
	LAB/IPP-07		

4. Rozdzielnik

Nr egz.	Instrukcję otrzymują	Data otrzymania i podpis	Data oddania i podpis
01	p.o. Kierownik Laboratorium Badań Mikrobiologicznych		
02	Egzemplarz prezentacyjny		