

Zlecenie

Cel badania: badanie biologicznych wskaźników kontroli procesu sterylizacji

1. Dane klienta/zleceniodawcy (nazwa firmy, adres, NIP)
.....
.....**tel.**
2. Miejsce pobrania próbki/-ek:.....
.....
3. Dane urządzenia: typ numer rok produkcji
4. Rodzaj wskaźnika biologicznego: Sporal A ☐ Sporal S ☐*

Producentseria..... data waż.
5. Rozmieszczenie wskaźników w komorze urządzenia:

góra ☐, dół ☐, środek ☐, inne ☐*
6. Parametry sterylizacji: temperatura, czas....., ciśnienie
7. Data i godzina pobrania próbki/-ek:
8. Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej sterylizację:
9. Sposób przekazania faktury i sprawozdania z badania: wysłać pocztą / odbiór osobisty*
.....
.....

Należność za wykonaną usługę zostanie zapłacona wg obowiązującego cennika.

Należność za badania płatna gotówką w kasie PSSE w Siedlcach lub przelewem na konto Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach 08-110 Siedlce ul. Poniatowskiego 31 (w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury), konto: NBP O/O Warszawa 48 1010 1010 0119 6322 3100 0000. Nieuregulowanie należności w terminie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych oraz skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury bez podpisu.

Próbka pobrana i transportowana zgodnie z: załącznik POL-06-IT-03-Z2

Procedura badawcza PB-20-EB wyd. 3 z dn. 28.08.2020

Laboratorium informuje, że zgodnie z art.1 pkt. 7 Ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i art.11 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zgłasza dodatnie wyniki badania skuteczności sterylizacji właściwemu terenowo Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu.

* Właściwe zaznaczyć

.....
(data, podpis Zleceniodawcy)

INSTRUKCJA POBIERANIA I TRANSPORTU
wskaźników biologicznych użytych do kontroli procesu sterylizacji
Załącznik POL-06-IT-03-Z2 data wydania 14.09.2020

1. Do kontroli danego typu urządzenia sterylizacyjnego należy dobrać odpowiedni wskaźnik biologiczny.
2. Wskaźniki biologiczne do kontroli urządzeń sterylizujących parą wodną w nadciśnieniu oraz suchym, gorącym powietrzem zabezpiecza Laboratorium. Otrzymane testy, do czasu użycia, klient powinien przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.
3. Wnętrze sterylizatora powinno być wypełnione odpowiednim ładunkiem, testy - umieścić wewnątrz pakietów kontrolnych na poszczególnych poziomach komory sterylizacyjnej.
4. Proces pracy urządzenia sterylizacyjnego powinien być nadzorowany tak, aby można było podać wszystkie dane do protokołu pobrania próbek - Formularz POL-06-IT-03-F5.
5. Po zakończeniu procesu sterylizacji wyjąć z pakietów testy biologiczne, każdy zabezpieczyć dodatkowym opakowaniem papierowym, na którym należy napisać numer miejsca położenia testu oraz numer urządzenia /patrz protokół/.
6. Jeżeli klient zaopatruje się w testy biologiczne indywidualnie to oprócz testów użytych do kontroli urządzenia sterylizacyjnego dostarcza również jeden test z użytej serii nie poddany sterylizacji, celem wykonania posiewu kontrolnego.
7. Próbkę przechowywać w temperaturze pokojowej.
8. Dostarczyć do Laboratorium w ciągu 24 godzin po pobraniu do Punktu Przyjmowania Próbek Sporotestów, łącznie z formularzem POL-06-IT-03-F5.

PRZYJĘCIE PRÓBEK DO LABORATORIUM

Numer zlecenia Data i godzina przyjęcia

Kod próbki/-ek.....

Uwagi o stanie próbki/-ek

Przegląd i przyjęcie zlecenia

data i podpis

.....
(potwierdzenie odbioru próbki/-ek w pracowni)