

Zasady użycia, przechowywania i transportu sporali S do badań

I. Zasady postępowania ze sporalami:

- Przed użyciem sporale S należy przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła, chroniąc przed zawilgoceniem.
- Przed zastosowaniem należy sprawdzić stan oraz termin ważności wskaźników uszkodzonych i przeterminowanych sporali nie należy używać.
- Sporale, przed włożeniem do sterylizatora lub po ich wyjęciu, należy oznaczyć odpowiednio I, II – zgodnie z umiejscowieniem wskaźnika w komorze urządzenia i opisem umieszczonym na zleceniu na badanie. Podczas oznaczania sporali należy uważać, aby nie doszło do uszkodzenia (przedziurawienia) opakowania (papierowej koperty).
- Niezużyte lub przeterminowane sporale należy spalić.

II. Sposób użycia sporali:

- Do kontroli procesu sterylizacji należy użyć **dwóch** sporali S.
- Sporale należy włożyć do dwóch największych pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku i umieścić w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego.
- Należy przeprowadzić ustalony program sterylizacji.
- Po zakończeniu procesu sterylizacji i spadku temperatury w sterylizatorze co najmniej do 80 °C należy wyjąć sporale z załadunku i zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem poprzez umieszczenie ich w papierowej torebce, kopercie lub zawinięcie w czystą kartkę papieru.

III. Przechowywanie i transport sporali do laboratorium:

- Sporale należy dostarczyć do laboratorium w czasie **nie dłuższym niż 24 godziny od zakończenia procesu sterylizacji**, w temperaturze otoczenia, chroniąc przed zawilgoceniem
- Do czasu transportu sporale należy przechowywać **w temperaturze pokojowej**.
- Do próbek należy dołączyć **dokładnie i czytelnie** wypełnione „Zlecenie na badanie laboratoryjne sporali” – F/I/PO/OL/LMiP-04-04-04.

Formularz zlecenia dostępny jest w Punkcie przyjmowania próbek do badań diagnostycznych od pacjentów oraz na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Zielonej Górze.

W przypadku przekroczenia limitu czasu dostarczenia sporali do laboratorium lub użycia jednego wskaźnika **posiew nie będzie wykonany, a za wydanie kolejnych sporali pobierana będzie opłata.**