

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BYDGOSZCZY.
DZIAŁ LABORATORYJNY.
ODDZIAŁ BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH.

Wyciąg z załącznika nr 5 do PL-02/IR-01/LM wydanie 1 załącznika z dnia 2021-01-04

1.3. Pobieranie i transport wymazów z odbytu / kału w kierunku wykrywania pałeczek *Enterobacterales* wytwarzających karbapenemazy metodą hodowlaną i krążkowo-dyfuzyjną

Wymaz z odbytu / kału pobiera się na wymazówkę z zestawu do podłoża transportowego (do nabycia w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy).

Prawidłowe pobieranie wymazu z odbytu:

Pobrać wymaz ostrożnie wkładając wymazówkę na głębokość około 1 cm poza zwieracz odbytu i kilkakrotnie obracając. Wymazówkę włożyć do podłoża transportowego (probówka), dokładnie zamknąć, opisać imieniem i nazwiskiem osoby, od której materiał został pobrany oraz datą i godziną pobrania. Tak pobraną próbkę można przechowywać maksymalnie do 48 godzin w warunkach chłodniczych (2-8°C±1).