

	INSTRUKCJA OGÓLNA ODDZIAŁU LABORATORYJNEGO	Strona / stron	1 z 1
		Data wydania	02.01.2020 r.
	PRZECHOWYWANIE PRÓBEK W PRACOWNI	Nr wydania	06
	IM-03/PM-09	Nr egzemplarza	01

1. Cel instrukcji.

Celem instrukcji jest zapewnienie optymalnych warunków przechowywania próbek od chwili ich przyjęcia do Laboratorium Mikrobiologii do momentu rozpoczęcia diagnostyki.

2. Przedmiot i zakres stosowania instrukcji.

Instrukcja dotyczy zasad przechowywania próbek do badań mikrobiologicznych i obowiązuje w Laboratorium Mikrobiologii w PSSE w Oleśnicy.

3. Odpowiedzialność.

3.1. Instrukcję zatwierdza Dyrektor PSSE w Oleśnicy, zarządza Kierownik Oddziału Laboratoryjnego.

3.2. Za rozpowszechnianie i nadzorowanie prawidłowości realizacji działań objętych procedurą odpowiada Kierownik Oddziału Laboratoryjnego.

3.3. Za stosowanie procedury odpowiada każdy kogo ona dotyczy.

4. Terminy i definicje.

Brak

5. Tryb postępowania.

5.1. Próbkę kału do badań bakteriologicznych należy przechowywać w temperaturze pokojowej do 2 godz., w lodówce w temp. 2-8°C do 24 godzin. Wymazy z odbytu, na wymazówce umieszczonej w podłożu transportowym, należy przechowywać w temperaturze pokojowej nie dłużej niż do 72 godzin.

5.2. Wskaźniki biologicznej skuteczności procesu sterylizacji należy umieścić w inkubatorze niezwłocznie po przyjęciu do Laboratorium; w wyjątkowych sytuacjach można przechowywać w temp. 2-8°C, nie później niż 24 godziny po wykonaniu procesu sterylizacji.

6. Dokumenty związane.

Brak

7. Wykaz załączników.

Brak