

Instrukcja pobierania, przechowywania i transportu próbek z biologicznymi wskaźnikami kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu

Kontrolę skuteczności sterylizacji należy przeprowadzić okresowo oraz w przypadku zmiany warunków procesu sterylizacji lub osoby obsługującej; nowego typu załadunku, po naprawie urządzenia lub w przypadku jego nieprawidłowego działania.

1. Próbkę stanowi biologiczny wskaźnik w formie bibuły nasyczonej zawiesiną spor szczepu *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953, który służy do przeprowadzenia kontroli procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu (autoklawy).
2. Minimum 2 wskaźniki należy umieścić wewnątrz komory autoklawu w miejscu najtrudniej dostępnym dla czynnika sterylizującego.
3. Czynnikiem sterylizującym jest nasyczona para wodna w nadciśnieniu w temp. 121°C (nadciśnienie – 1 atm) lub w tem. 134°C (nadciśnienie – 2 atm).
4. Parametry sterylizacji (temperatura, ciśnienie pary wodnej i czas) zależą od zastosowanej technologii sterylizacji parowej oraz od sterylizowanego materiału.
5. Do badanej próbki należy dołączyć wskaźnik kontrolny nie poddany procesowi sterylizacji (tej samej serii co badany test).
6. Używane testy powinny mieć aktualną datę ważności.
7. Testów nie należy otwierać i wyjmować z opakowania papierowo-foliowego.
8. Do badanej próbki należy dołączyć czytelnie wypełnione „Skierowanie na badanie laboratoryjne testów kontroli sterylizacji”.
9. Czas dostarczenia wskaźnika biologicznego do laboratorium nie może przekraczać 24 h.
10. Sposób przechowywania i transportu próbek:
Próbki podczas transportu do punktu przyjęć należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu i nie były narażone na działanie czynników fizyko-chemicznych. Wraz z próbkami należy dostarczyć **dowód wpłaty** za badanie oraz czytelnie wypełnione „**Skierowanie na badania laboratoryjne testów kontroli sterylizacji**”, dostępne do pobrania ze strony internetowej PSSE Myślibórz. Próbki wraz ze wskaźnikiem kontrolnym po zakończeniu procesu sterylizacji należy dostarczyć do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myśliborzu.
11. **PRZYJĘCIE PRÓBEK I WYDAWANIE WYNIKÓW:**
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myśliborzu
74-300 Myślibórz, ul. Północna 15, II piętro, pokój 231
 - przyjęcie próbek – poniedziałek w godzinach od 8.00-10.00
 - odbiór wyników – po 10 dniach od dnia dostarczenia próbek w godzinach urzędowania PSSE

12. **KOSZT BADANIA:**
156.00 zł

Opłatę za badanie należy uiścić przelewem na konto Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myśliborzu : **nr NBP O/O Szczecin 05 1010 1599 0520 2522 3100 0000**

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 95 747 56 16 wewn. 326

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Myśliborzu „Instrukcja pobierania, przechowywania i transportu próbek z biologicznymi wskaźnikami kontroli skuteczności i sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu” Wydanie nr 3 z dn. 28.07.2026r.