

Zlecenie na badanie materiału biologicznego
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie

Zlecam wykonanie badań	Status zdrowotny badanego*:	Do celów*:	Istotne dane kliniczne*:
mikrobiologicznych*:	- zdrowy	- diagnostycznych	
- wymazu z kału	- chory	- sanitarno-epidemiologicznych	
- wymazu z odbytu	- ozdrowieniec	Tryb wykonania badania*:	
- kał	- nosiciel	- zwykły	
- szczep mikrobiologiczny	- osoba ze styczności	- pilny	

Próbka pobrana od
 imię i nazwisko data urodzenia

Adres miejsca zamieszkania

Płeć:

K	M
---	---

PESEL:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Nr dokumentu potwierdzającego tożsamość
 Wypełnić w przypadku braku nr PESEL

Data i godzina pobrania materiału do badania, imię i nazwisko osoby pobierającej próbki*:

Próbka nr1 Próbka nr2 Próbka nr 3

Dane do kontaktu ze zleceniodawcą / przedstawicielem ustawowym badanego:

Nazwa (firma) i adres zleceniodawcy nr telefonu:

..... adres e-mail: Hasło*

..... adres do przesłania wyników*
(jeśli inny niż adres zamieszkania)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie, ul. Kisielewskiego 12, 38-400 Krosno, w celu realizacji zlecenia. Podaję swoje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. Zapoznałem/(am) się z treścią klauzuli informacyjnej w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do swoich danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. W przypadku wyhodowania pałeczek Salmonella/Escherichia coli/innych patogenów i konieczności dalszej identyfikacji wyrażam zgodę na przesłanie w/w do OL WSSE w Rzeszowie (zakres akredytacji AB343, zastosowana metoda badawcza w oparciu o wydawnictwa metodyczne PZH). Odstępuję od sporządzenia dodatkowej umowy oraz udziału w badaniach laboratoryjnych.

Sprawozdanie z badań proszę sporządzić w egzemplarzach. Sposób odbioru sprawozdania: osobiście / osoba upoważniona / za pomocą systemów informatycznych*

Forma płatności: bezpłatne / gotówka / przelew.* Za prawidłowe pobranie i dostarczenie próbek do badania odpowiada Klient / PSSE*.

Zleceniobiorca oświadcza, że:

Termin realizacji zlecenia do 7 dni. Koszt zlecenia wg cennika. Poinformowano Klienta o możliwości złożenia reklamacji/skargi. Zapoznano Klienta ze sposobem postępowania z próbkami w zakresie pobierania, przechowywania i transportowania próbek do badań, rejestrowania i oznakowania materiału biologicznego. Oddział laboratoryjny zapewnia bezstronność i niezależność podczas realizacji zlecenia oraz gwarantuje zachowanie poufności informacji i ochronę praw własności. Zgodnie z Art. 29. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, laboratorium oprócz Klienta powiadamia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego dla siedziby laboratorium.

Metody badań* wynikają z wytycznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH - metody akredytowane – akredytacja AB-624:

- PB/EP-06 wyd.5 z dnia 26.07.2010r Obecność i identyfikacja pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym

- PB/EP-01 wyd. 6 z dnia 26.07.2010r Obecność i identyfikacja pałeczek Salmonella spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym

- PB/EP-02 wyd. 6 z dnia 26.07.2010r Obecność i identyfikacja pałeczek Shigella Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym

Zakresy metod badawczych, instrukcje postępowania z próbkami, obowiązujące formularze dokumentów dostępne na stronie internetowej

<https://www.gov.pl/web/psse-krosno>

Po zakończeniu badań próbki są utylizowane lub mogą być wykorzystane do wewnętrznej kontroli jakości badań lub badań sanitarno-epidemiologicznych.

Data, podpis zlecającego badanie

Informacje dla Klienta**POBIERANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH**

Każdy materiał biologiczny (np. kał, wymazy) należy traktować jako potencjalnie zakaźny.

Próbki materiału biologicznego podczas ich przechowywania i transportu powinny być zabezpieczone w zamkniętych probówkach / pojemnikach / opakowaniach zbiorczych, bez możliwości otwarcia w celu dokonania zamiany.

POBIERANIE WYMAZU Z KAŁU

Wymaz z kału pobiera się jałową wymazówką poprzez kilkukrotne obrócenie w materiale kałowym, a następnie umieszczenie w probówce z podłożem transportowym. Tak pobrane próbki należy przechować w temp. od + 2°C do + 8°C maks. do 72 godzin i dostarczyć do laboratorium w temp. otoczenia.

POBIERANIE WYMAZU Z ODBYTU

Wymaz z odbytu jest pobierany przez uprawniony personel medyczny (lekarz, pielęgniarka, diagnosta laboratoryjny) jałową wymazówką.

Wymazówkę należy włożyć poza zwieracz odbytu i kilkukrotnie obrócić tak, aby na waciku znalazł się ślad kału z fragmentami złuszczonego nabłonka końcowego odcinka jelita grubego. Następnie wymazówkę umieszcza się w jałowej probówce z podłożem transportowym.

Tak pobrane próbki należy przechować w temp. od + 2°C do + 8°C maks. do 72 godzin i dostarczyć do laboratorium w temperaturze otoczenia.

POBRANIE KAŁU DO BADANIA

Naczynie, do którego ma być oddany kał przeznaczony do pobrania próbki do badania, powinno być uprzednio dobrze umyte i wyparzone wrzątkiem, np. nocnik, basen, naczynie jednorazowe, nakładka na toaletę. Uwaga: Nie wolno pobierać próbek kału z ogólnodostępnych misek sedesowych, gdyż może to rzutować na wynik badania. Próbkę kału należy pobrać łyżeczką znajdującą się w pojemniku kałowym:

- wielkości orzecha laskowego – kał uformowany, ▪ 2 - 5ml – kał całkowicie płynny.

Pojemnik z próbką należy oznaczyć za pomocą nalepki podając imię i nazwisko, datę i godz. pobrania próbki. Pojemnik z próbką należy umieścić w opakowaniu foliowym. Do każdej próbki należy dołączyć wypełniony formularz zawierający niezbędne dane.

Próbkę dostarczyć niezwłocznie do laboratorium nie później niż w ciągu 2 godz. od pobrania w temperaturze otoczenia. W przypadku, gdy próbka nie może zostać dostarczona do laboratorium w dniu pobrania pobrać wymaz z kału.

IDENTYFIKACJA WYZIŁOWANEGO SZCZEPU

Wyziolowany szczep bakteryjny dostarczyć na wymazówce z podłożem transportowym, szczelnie zamkniętej probówce ze skosem agarowym lub w postaci hodowli na płytce Petriego. Probówkę bądź płytkę zawinąć w materiał chłonny (wata, bibuła) i umieścić w opakowaniu zapobiegającym uszkodzeniu jego zawartości. Szczep bakteryjny pobrany na podłoże transportowe dostarczyć w ciągu 24 godzin w temperaturze otoczenia. Jeśli nie jest to możliwe, próbki pobrane na podłoże transportowe przechowuje się maksymalnie do 72 godzin w temp. od + 4°C do + 8°C. Szczep bakteryjny pobrany na podłoże inne niż transportowe dostarczyć w ciągu 24 godzin w temperaturze otoczenia.

Zapoznałem się

podpis

Przyjęcie próbki do Punktu Przyjęcia Materiału do Badań

Data, godzina przyjęcia materiału do badań:	imię i nazwisko osoby przyjmującej/przekazującej próbkę:
1)	
2)	
3)	

Przyjęcie próbki do Oddziału Laboratoryjnego

Po dokonaniu oceny przydatności do badań laboratoryjnych oraz zgodności ze zleceniem próbka (i) zostały przyjęte / nie zostały przyjęte * (przyczyna odmowy wykonania badania) do Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Krośnie - Pracownia Epidemiologii

Data, godzina, imię i nazwisko osoby przyjmującej próbkę:	Kod próbki z rejestru pracowni:	Przegląd zlecenia w Oddziale Laboratoryjnym dokonał (data, podpis):
1)		
2)		
3)		

* - właściwie zaznaczyć