

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE
DZIAŁ LABORATORYJNY
ODDZIAŁ LABORATORYJNY W KAMIENIU POMORSKIM
 72-400 Kamień Pomorski ul. Wolińska 7 tel. 91/32-10-746

ZLECENIE BADANIA OCENY SKUTECZNOŚCI STERYLIZACJI

ZLECENIODAWCA (nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail)/ ADRES DO PRZESŁANIA SPRAWOZDANIA Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Świnoujściu ul. Dąbrowskiego 4, 72-600 Świnoujście tel. 91 321 24 94 e-mail. psse.swinoujscie@sanepid.gov.pl					
DANE WYKONUJĄCEGO KONTROLĘ SKUTECZNOŚCI STERYLIZACJI (nazwa, adres, numer telefonu)		MIEJSCE USYTUOWANIA STERYLIZATORA		OSOBA NADZORUJĄCA PROCES STERYLIZACJI	
TYP I DANE TECHNICZNE STERYLIZATORA		ZASTOSOWANY WSKAŹNIK BIOLOGICZNY (zaznaczyć właściwe)			MIEJSCE ZAŁADUNKU
		☐ sporal A (Geobacillus stearothermophilus) ☐ sporal S (Bacillus subtilis) ☐ (wpisać datę ważności)			☐ góra ☐ dół ☐ środek ☐ przód ☐ tył
PARAMETRY STERYLIZACJI					
DATA /GODZINA PROCESU	CZAS	TEMPERATURA	CIŚNIENIE	TEST KONTROLNY (K+)	
				☐ obecny ☐ brak	
ZASTOSOWANA METODA BADAWCZA		Oświadczam, że próbka została pobrana zgodnie z instrukcją opisaną na odwrocie oraz akceptuję metodę badawczą, która będzie zastosowana przy wykonaniu badania (data, podpis osoby pobierającej próbkę)			
PB/LEO/01 (metoda hodowlana) wyd. VII z dnia 02.08.2022					
..... (data, podpis zleceniodawcy)					
wypełnia Laboratorium Diagnostyki Mikrobiologicznej					
DATA/ GODZ. PRZYJĘCIA PRÓBKİ	NUMER UMOWY -ZLECENIE	STAN PRÓBKİ	KOD PRÓBKİ	NUMER SPRAWOZDANIA	PODPIS OSOBY PRZYJMUJĄCEJ PRÓBKĘ
		☐ bez zastrzeżeń ☐ inny	DM/	DM/	

INSTRUKCJA POBIERANIA BIOLOGICZNYCH WSKAŹNIKÓW SKUTECZNOŚCI PROCESU STERYLIZACJI

Kontrola skuteczności sterylizacji powinna być prowadzona w następujących przypadkach:

- ✓ okresowo, z indywidualnie ustaloną przez użytkownika sterylizatora częstotliwością
- ✓ w sytuacji podejrzenia o nieprawidłowe działanie sterylizatora
- ✓ po remoncie/usunięciu awarii urządzenia
- ✓ przy wprowadzeniu nowego rodzaju załadunku
- ✓ przy zmianie warunków procesu sterylizacji.

Sposób pobrania:

- ✓ włożyć biologiczne wskaźniki skuteczności sterylizacji do nie mniej niż dwóch pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku i umieścić w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego
- ✓ przeprowadzić ustalony program sterylizacji zachowując właściwe parametry sterylizacji (temperatura, czas, ciśnienie)
- ✓ wyjąć wskaźniki testowe z załadunku - opisać miejscem załadunku
- ✓ przekazać do badań w ciągu 24 godzin od przeprowadzenia procesu sterylizacji, przechowując je w temperaturze pokojowej.

Do badań należy również przekazać wskaźnik niepoddany procesowi sterylizacji, który stanowi kontrolę żywotności drobnoustrojów zawartych we wskaźniku (opisać jako K+).