

Pobieranie, transport i przechowywanie próbek na badanie mikrobiologicznej kontroli skuteczności sterylizacji

(Instrukcja dla pacjenta)

1. Próbki przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 12:00.

2. Postępowanie w zależności od rodzaju próbki:

2.1. Sporal A – wskaźniki testowe należy włożyć do nie mniej niż dwóch największych pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku i umieścić w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego. Następnie po przeprowadzonym ustalonym programie sterylizacji wyjąć wskaźniki z załadunku i w czasie nie dłuższym niż 24 godziny dostarczyć do pracowni. Kontrolę żywotności drobnoustrojów stanowi wskaźnik nie poddany procesowi sterylizacji.

2.2. Sporal S - Z opakowania należy wyjąć torebki z krążkami Sporal S i następnie umieścić w różnych miejscach komory sterylizatora. Proces sterylizacji należy przeprowadzić zachowując parametry sterylizacji (temperatura, czas) zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Po zakończeniu sterylizacji przenieść krążki z zachowaniem warunków jałowości do opakowania a następnie jak najszybciej dostarczyć do laboratorium.

3. Do momentu dostarczenia do laboratorium materiał przechowywać w temperaturze 15-27°C.

4. Próbki należy transportować w temperaturze 15-27°C.