



**Zlecenie na badanie nr
w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie**

.....
dane zlecniodawcy

Cel badania: kontrola skuteczności sterylizacji

Testy bakteryjne ekspozowane w.....

Ul..... oddział, gabinet

Osoba obsługująca urządzenie.....

Nazwa urządzenia..... nr fabryczny..... rok produkcji.....

Parametry sterylizacji- temperatura.....czas.....ciśnienie.....

Kod próbki (wypełnia laboratorium)	Rodzaj testu	Data ekspozycji	Miejsce ekspozycji

Adres przesłania wyniku badania/ osoba upoważniona do odbioru wyniku.....

Rodzaj działalności/badane cechy	Dokument odniesienia
^A Obecność drobnoustrojów wskaźnikowych <i>Geobacillus stearothermophilus</i>	PB-46/E wydanie 8 z dnia 20.01.2024 w oparciu o instrukcję producenta ATTEST 3M, Spor View, BROWNE, STERIM BI
^A Obecność drobnoustrojów wskaźnikowych <i>Bacillus subtilis, Bacillus stearothermophilus,</i> <i>Bacillus atrophaeus</i>	PB-47/E wydanie 7 z dnia 20.01.2024 w oparciu o instrukcję producenta Sporal S, Spordex VHP NA, SGM STRIP

A- badanie akredytowane certyfikat AB 379 aktualny zakres akredytacji www.pca.gov.pl

**-badanie nie objęte zakresem akredytacji

PB - procedura badawcza opracowana w laboratorium

Zapoznałem się z instrukcją zlecania badania laboratoryjnego oraz instrukcją wykonania procesu kontroli sterylizacji (dostępnymi na www.gov.pl/web/wsse-lublin/badania-laboratoryjne) i zrozumiałem je

☒ F-03/IR-01/PO-05/DL/OBM

☒ F-06/IR-01/PO-05/DL/OBM

Zostałem poinformowany:

- o stosowanych w Laboratorium metodach badawczych umieszczonych w zleceniu i je akceptuję,
- że laboratorium dysponuje odpowiednim sprzętem i doświadczonym personelem umożliwiającym wykonanie zlecenia,
- że wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanych próbek,
- o zachowaniu poufności informacji pozyskanych i wytworzonych podczas realizacji zlecenia z wyjątkiem obowiązku zgłoszenia dodatknych wyników wynikającego z Ustawy z dnia 5.12.2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
- że informacje o przetwarzaniu danych osób fizycznych znajdują się na stronie internetowej zlecniodawcy.

.....
podpis zlecniodawcy

Stan próbki w chwili przyjęcia (*zaznaczyć właściwy): prawidłowy ☐, nieprawidłowy ☐

Data/godzina przyjęcia materiału

.....
podpis osoby przyjmującej zlecenie

Proszę o udostępnienie wyników badań laboratoryjnych za pośrednictwem internetowej platformy prezentacji wyników eLaborat poprzez otrzymany kod identyfikujący zlecenie. Wyniki oraz Regulamin użytkowania serwisu internetowego eLaborat dostępne są stronie internetowej WSSE w Lublinie w zakładce: co robimy-badania epidemiologiczne

.....
czytelny podpis zleceniodawcy

*- właściwe podkreślić jeżeli dotyczy nieodpłatnych obowiązujących badań sanitarno-epidemiologicznych w trybie ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

F-06/IR-01/PO-05/DL/OBM
wydanie 3 z dnia 09.02.2026

Instrukcja wykonania procesu kontroli sterylizacji

Sposób wykonania kontroli biologicznej procesu sterylizacji przy użyciu testów Sporal:

1. Wyjąć z opakowania foliowego torebki papierowej z krążkami „Sporal S” i umieścić w najtrudniej dostępnych miejscach załadunku sterylizatora.
2. Uwaga! Nie odpakowywać krążków „Sporal S” z papierowej osłonki.
3. Próbkę opisać podając miejsce ekspozycji.
4. Przeprowadzić proces sterylizacji.
5. Po zakończeniu procesu sterylizacji wyjąć wskaźniki biologiczne, zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym i kontaminacją oraz dostarczyć do laboratorium wraz z wypełnionym zleceniem na badanie w czasie do 24 godzin od zakończenia sterylizacji.

Testy przyjmowane są do laboratorium od poniedziałku do piątku w godz. 10³⁰ – 11³⁰

Wyniki badań – dostępne są w formie elektronicznej (przez 90 dni od daty badania) lub do odbioru osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku od 11³⁰ do 14⁰⁰

Sposób wykonania kontroli biologicznej procesu sterylizacji przy użyciu wskaźników biologicznych typu 3M, ATTEST, BROWN, SporView

Testy biologiczne do kontroli sterylizacji w autoklawach można zakupić w WSSE Lublin ul. Pielęgniarek 6 w godz. 7⁴⁵ – 14⁴⁵ (ceny ujęte w cenniku na stronie WSSE).

1. Umieścić wskaźniki biologiczne w najtrudniej dostępnych miejscach załadunku autoklawu, zabezpieczyć przed zgnieceniem.
2. Przeprowadzić proces sterylizacji.
3. Po zakończeniu procesu sterylizacji wyjąć wskaźniki biologiczne i upewnić się, że wskaźnik chemiczny wydrukowany na etykiecie zmienił kolor.
4. Próbkę opisać podając miejsce ekspozycji.
5. Zabezpieczyć wskaźniki przed uszkodzeniem mechanicznym i dostarczyć do laboratorium w ciągu 2 godzin po zakończeniu ekspozycji. Jeżeli wskaźników nie można dostarczyć w tym czasie, należy je przechowywać w lodówce i przekazać do laboratorium w czasie do 24 godzin.

Testy przyjmowane są do laboratorium od poniedziałku do czwartku w godz. 10³⁰ – 11³⁰.

Wyniki badań – dostępne są w formie elektronicznej (przez 90 dni od daty badania) lub do odbioru osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku od 11³⁰ do 14⁰⁰.