

**INSTRUKCJA UŻYCIA WSKAŹNIKA BIOLOGICZNEGO DO
KONTROLI SKUTECZNOŚCI STERYLIZACJI SUCHYM GORĄCYM POWIETRZEM –
Sporal S**

OPIS:

Wskaźnik biologiczny Sporal S przeznaczony jest do monitorowania skuteczności sterylizacji w suchym gorącym powietrzu.

INSTRUKCJA UŻYCIA:

Z opakowania wyjąć trzy torebki papierowe z krążkami Sporal S i umieścić w różnych miejscach komory sterylizatora. Proces sterylizacji prowadzić zachowując parametry sterylizacji (czas, temperatura) zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

Po zakończeniu procesu sterylizacji i ochłodzeniu komory wyjąć wskaźniki.

Uwaga! Wskaźniki ze spalonymi bibułkami zabezpieczającymi nie będą przyjmowane!

Zabezpieczone 3 krążki wraz z pozostawionym w aluminiowej torebce producenta krążkiem kontrolnym oraz wypełnionym formularzem zlecenia dostarczyć do badania tak szybko jak to możliwe.

Gdy czas od wyjęcia do dostarczenia do laboratorium PSSE, przekracza 2 godziny, należy przechowywać je w temperaturze 2-8 °C i dostarczyć max 24 godziny po zakończeniu sterylizacji.