

Zlecenie na badanie laboratoryjne (nr)^L
biologicznego wskaźnika stosowanego w celu kontroli skuteczności sterylizacji
do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, PSSE w Łomży, ul. Dworna 21,
tel. 696 496 444, e-mail: laboratorium@lomza.psse.gov.pl

1. Dane Zleceniodawcy (nazwa, adres, NIP, telefon kontaktowy/pieczątka):

2. Rodzaj próbki (przedmiot badań): *biologiczne wskaźniki kontroli skuteczności sterylizacji :*

Rodzaj wskaźnika: ☐ sporal A ☐ inny

☐ sporal S

☐ Attest 3M 1262

Wskaźnik nr test kontrolny seria/data ważności:

Wskaźnik nr lokalizacja* seria/data ważności:

Wskaźnik nr lokalizacja* seria/data ważności:

Wskaźnik nr lokalizacja* seria/data ważności:

3. Rodzaj sterylizatora:

Nazwa urządzenia:

Typ urządzenia:

Nr fabryczny urządzenia: rok produkcji:

4. Miejsce *użytkowania* urządzenia; *pobrania próbki* - adres (jeśli istotne)

5. Data i godzina *zakończenia* sterylizacji

6. Parametry procesu sterylizacji: czas..... / temperatura/ ciśnienie (jeśli dotyczy)

7. Inne istotne informacje (np. rodzaj i nr wsadu; *cel badania*):

8. Dane osoby przeprowadzającej sterylizację (pobierającej próbkę).....

9. Dane osoby upoważnionej do odbioru sprawozdania z badania lub miejsce przestania sprawozdania:

10. Zlecam wykonanie badania wg procedury badawczej stosowanej w laboratorium: *na odwrocie zlecenia*

11. Próbkę pobrano zgodnie z zaleceniami producenta wskaźników - tak ☐ /nie ☐ **

Oświadczam, że zostałem poinformowany o sposobie pobrania próbek i biorę całkowitą odpowiedzialność za pobranie, przechowywanie i transport próbek do laboratorium. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. „h” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119s.1). Oświadczam, że zapoznałem/em się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Podpis klienta/osoby zlecającej badanie

Data wystawienia zlecenia

* rozmieszczenie wskaźników w urządzeniu (jeśli istotne)

**** zaznaczyć właściwe**

skrót „bz” – „bez zastrzeżeń”

WYPEŁNIA LABORATORIUM ^(L)

Ocena stanu próbki Próbkę dostarczył:

Kod próbki

data i godzina przyjęcia próbki

podpis osoby przyjmującej próbkę
i dokonującej przeglądu zlecenia

Warunki przechowywania materiału przed rozpoczęciem badania:

..... miejsce czas temperatura sposób przechowywania osoba odpowiedzialna

PB-01 „Badanie biobójczej skuteczności procesów sterylizacji przy użyciu wskaźników biologicznych”
wydanie 5 z dnia 10.02.2020 r. w oparciu o instrukcje producentów testów – metoda hodowlana

POBIERANIE, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE TESTÓW BIOLOGICZNEJ KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI

Warunki przechowywania wskaźników przed użyciem:

- temperatura pokojowa, z dala od źródeł ciepła,
- chronić przed zawilgoceniem,
- nie używać po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu,
- wskaźniki nie użyte lub przeterminowane należy spalić lub poddać sterylizacji .

SPORAL A i SPORAL S

Sposób użycia:

- Wskaźniki testowe włożyć do pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku i umieścić w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego. Przeprowadzić ustalony program sterylizacji. Wyjąć wskaźniki z pakietu kontrolnego i opisać (rozmieszczenie).
- Zabezpieczone przed uszkodzeniem wskaźniki (np. umieszczone w kopercie) należy dostarczyć do laboratorium w ciągu 2 godzin od zakończenia kontrolowanego procesu. Próbkę transportować w temperaturze pokojowej. Jeśli nie jest to możliwe, wskaźniki należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta (np. w temperaturze pokojowej i w czasie nie dłuższym niż 24 godziny dostarczyć do laboratorium).
- Należy dodatkowo dostarczyć wskaźnik nie poddany procesowi sterylizacji jako **test kontrolny** żywotności drobnoustrojów – tej samej serii co testy badane.

ATTEST 3 M

Sposób użycia:

- Wskaźniki testowe włożyć do pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku i umieścić w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego. Przeprowadzić ustalony program sterylizacji. Wyjąć wskaźniki z pakietu kontrolnego i opisać (rozmieszczenie).
- Wskaźniki należy dostarczyć do laboratorium w ciągu 2 godzin od zakończenia kontrolowanego procesu. Próbkę transportować w temperaturze pokojowej. Jeśli nie jest to możliwe, wskaźniki należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta (np. umieścić w lodówce w temperaturze od 4°C do 8°C).
- Należy dodatkowo dostarczyć wskaźnik nie poddany procesowi sterylizacji jako **test kontrolny** żywotności drobnoustrojów – tej samej serii co testy badane.

Próbki są przyjmowane do laboratorium wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem zlecenia

od poniedziałku do czwartku w godz. 8⁰⁰ - 11³⁰

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr **696 496 444**