

Zawiadomienie dotyczące bezpieczeństwa

Nazwa urządzenia: Molift Mover 205, Molift Mover 300, 2-punktowe drążki nosideł Molift, 4-punktowe drążki nosideł Molift

Data: 19.11.2025



Szanowny Kliencie,


Niniejsze zawiadomienie dotyczące bezpieczeństwa ma na celu przekazanie użytkownikom i placówkom ochrony zdrowia informacji o działaniach naprawczych dotyczących wyżej wymienionych wyrobów medycznych. W niniejszym zawiadomieniu opisano przyczyny i sposób wdrożenia działań naprawczych.

Przyczyny:

Klient relacjonuje, że podczas montażu i testów obciążenia podnośnika Molift Mover 300 złamała się śruba mocująca drążek podnoszący. Po dalszym zbadaniu reklamacji klienta okazało się, że wada wynika z odkształcenia użytych materiałów pomiędzy drążkiem podnoszącym a ramieniem podnośnika Molift Mover. Tego rodzaju odkształcenie może prowadzić do ograniczonej ruchomości stawu, co uniemożliwia prawidłowe działanie urządzenia.

Działanie naprawcze:

Aby zmniejszyć ryzyko dalszych incydentów, dla wszystkich potencjalnie wadliwych produktów oferowane są jednostki zamienne. Dalsze użytkowanie jest bezpieczne pod warunkiem, że drążek podnoszący może swobodnie się poruszać i pozostaje w pozycji pionowej podczas cyklu podnoszenia zarówno z obciążeniem, jak i bez. Jeżeli jest inaczej lub w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących funkcjonalności produktu należy natychmiast wycofać jednostkę z eksploatacji. Podzespoły wadliwych jednostek (Mover 205 i Mover 300) będą stopniowo wymieniane w nadchodzących miesiącach. Wadliwe drążki podnoszące również zostaną wymienione.

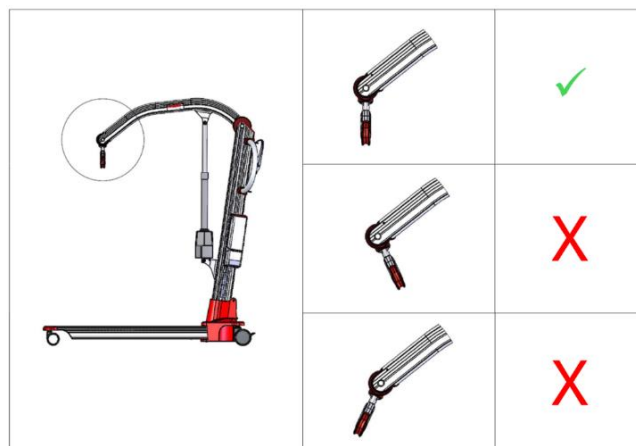

Firma Etac przeprasza za niedogodności i zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie niniejszego zawiadomienia wszystkim zainteresowanym pracownikom i organizacjom, do których urządzenie mogło zostać dostarczone.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym lub dystrybutorem.

Spodziewamy się, że działanie naprawcze zostanie zakończone do końca 2026 r.

Niniejsze zawiadomienie zostało przekazane właściwemu organowi regulacyjnemu.

Gedved, 19.11.2025

Z poważaniem,
Sampavi Rajkumar
Specjalista ds. jakości
Etac A/S
SRN: DK-MF-000017724

Numery artykułów	Nazwa urządzenia	Dystrybucja Wszystkie dostawy wysłane przez Etac Poland w okresie od lutego do sierpnia 2025 r.; numer seryjny/partii potencjalnie wadliwych produktów:
M14000, M14001, M1401, M1402, M1402-01, M14050, M14050-00, M14150	Molift Mover 205	593302, 599801, 599802, 603501, 604202, 593301, 612701, 612702, 612703, 584307, 616604, 616606, 590801, 590901, 590902, 590903, 590904, 590906, 591002, 591003, 593303, 612505, 612506, 612507, 612508, 591001, 604005, 604101, 612503, 596701, 615105, 615104, 615103, 615102, 604004, 604003, 604002, 604001, 591703, 591007, 591006, 591005, 591004, 615101, 612504, 620702, 612601, 604406, 604405, 604402, 591801, 585701, 584501, 585811, 585810, 585809, 585808, 585806, 585805, 585804, 585803, 585801, 596604, 596603, 596602, 596601, 596611, 596610, 596609, 596608, 596607, 596606, 596605, 614201, 614202, 612501, 612502, 604201, 593304, 604301, 604302, 604303, 604401, 604403, 604404, 591701, 591702, 615106, 616603, 593305, 590905, 620701, 620703, 585802, 585807
M15001, M15002, M1501, M1502, M1504, M15050, M15151	Molift Mover 300	601005, 601002, 611506, 621101, 585901, 585902, 585903, 585905, 586001, 586003, 598605, 584401, 591501, 591502, 621104,

		621105, 621106, 585904, 586101, 603602, 586002, 586004, 586005, 586006, 591401, 598607, 598608, 621102, 585906, 611505, 611504, 611502, 611501, 601008, 611503, 611302, 611301, 600902, 600901, 603601, 598606, 598604, 598602, 598601, 596501, 591601, 599702, 599703, 599701, 611507, 601001, 601006, 601007, 598603, 598609, 621103, 601003, 601004
1430115, 1430116, 1430117	2-punktowe drążki nosidła Molift	1430115 (3 sztuki), 1430116 (18 sztuk), 1430117 (4 sztuki)
1530101, 1530102, 1530103	4-punktowe drążki nosidła Molift	1530101 (33 sztuki), 1530102 (18 sztuk), 1530103 (2 sztuki).

Szanowny Kliencie, prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza odpowiedzi na adres Molift@etac.com w ramach potwierdzenia otrzymania tego powiadomienia **w ciągu 5 dni**.

Potwierdzamy, że przeczytaliśmy i zrozumieliśmy informację dostarczoną 20 listopada 2025 r., zawierającą komunikat „Notatka bezpieczeństwa dotycząca CCR 2508-11”.

Potwierdzamy otrzymanie komunikatów „Notatka bezpieczeństwa dotycząca CCR 2508-11”, „Informacja o produkcie PIF 2511-04” oraz „BM0300 Instrukcja wymiany zestawu M205 i M300”.

Niniejszy dokument, dostarczony w dniu 20 listopada 2025 r., zawiera listę numerów seryjnych, których dotyczy problem.

Potwierdzamy, że szukamy drążków nosideł Molift i podnośników Molift, których dotyczy problem.

Potwierdzamy, że zlokalizowaliśmy drążki nosideł i podnośniki, których dotyczy komunikat bezpieczeństwa stosowania produktu oraz że rozpoczęliśmy zbiórkę lub wymianę drążków nosideł i podnośników od użytkowników końcowych. O postępach w wymaganych działaniach należy poinformować firmę Etac A/S, podpisując niniejszy dokument.

Dokumentacja odpowiedzi sporządzona przez:

(nazwisko drukowanymi literami)

Tytuł:

(wydrukować)

Numer telefonu:

E-mail:

Jako potwierdzenie należy odesłać ten formularz wraz z wypełnionymi poniżej informacjami.

Data / podpis:

Nazwa i adres placówki:



Lista klientów - Molift Mover 205 i Mover 300

Produkt	Klient	Kraj	Liczba	Numer seryjny	Numer zamówienia zakupu
M1501	Medpunkt	PL	1	621103	1002244731