

**INSTRUKCJA UŻYCIA WSKAŹNIKA BIOLOGICZNEGO
DO STERYLIZACJI PAROWEJ ATTEST 1262**

OPIS:

Wskaźnik biologiczny Attest 1262 przeznaczony jest do monitorowania sterylizacji parowej w temp. 121°C i 132°C.

UWAGA:

Po sterylizacji fiolka jest gorąca i pod ciśnieniem. Należy pozostawić ją na 10 minut do wyschnięcia.

INSTRUKCJA UŻYCIA:

Wskaźnik biologiczny do momentu przeprowadzenia procesu sterylizacji należy przechowywać w temperaturze 15-30 °C, w warunkach wilgotności 35-60 %.

Należy opisać każdy wskaźnik na nalepce podając numer ładunku i datę sterylizacji.

Należy umieścić wskaźnik w miejscu, gdzie dostęp pary jest najtrudniejszy to znaczy w środku pakietu, który znajduje się w najchłodniejszym miejscu komory (w pobliżu drzwi i na dnie).

Po wyjęciu ładunku i ostygnięciu fiolki należy dostarczyć ją do badania tak szybko jak to możliwe.

Gdy czas od wyjęcia do dostarczenia do PSSE, przekracza 2 godziny, należy przechowywać ją w temperaturze 2-8 °C i dostarczyć max 24 godziny po zakończeniu sterylizacji.

OGRANICZENIA:

Nie ma zastosowania do:

- krótkich cykli sterylizacji w 132°C, poniżej 3 minut;
- sterylizacja tlenkiem etylenu lub inna sterylizacja w niższej temperaturze.