

TECHNIKA PRZEPROWADZANIA KONTROLI SKUTECZNOŚCI STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ W NADCIŚNIENIU

- Próbkę stanowi biologiczny wskaźnik w formie bibuły nasyconej zawiesiną spor szczepu *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953, który służy do przeprowadzania kontroli procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu (autoklawy).
- Minimum 2 wskaźniki należy umieścić wewnątrz komory sterylizatora w miejscu najtrudniej dostępnym dla czynnika sterylizującego.
- Czynnikiem sterylizującym w sterylizacji parowej jest para wodna w nadciśnieniu w temp. 121°C (nadciśnienie-1atm) lub w temp. 134°C (nadciśnienie-2 atm).
- Parametry sterylizacji (temperatura, ciśnienie pary wodnej i czas) zależą od zastosowanej technologii sterylizacji parowej oraz od sterylizowanego materiału.
- Do badanej próbki należy dołączyć wskaźnik kontrolny nie poddany procesowi sterylizacji (tej samej serii, co badany test).
- Używane testy powinny mieć aktualną datę ważności.
- Testów nie należy otwierać i wyjmować z opakowania papierowo-foliowego. Do badanej próbki należy dołączyć: "Skierowanie na badanie laboratoryjne testów kontroli sterylizacji".
- Po zakończeniu procesu sterylizacji próbki wraz ze wskaźnikiem kontrolnym należy dostarczyć wraz z wypełnionym „Skierowaniem na badanie laboratoryjne testów kontroli sterylizacji”.

Opłata za badanie -85.04zł.