

Sporal A, Sporal S, Duo-spor, Attest

- test biologiczny należy poddać sterylizacji, umieszczając w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego
- przeprowadzić proces sterylizacji
- po zakończeniu procesu sterylizacji, wyjąć wskaźniki testowe ze sterylizatora i włożyć oddzielnie do papierowych kopert
- do każdej nowej serii testu biologicznego, należy dostarczyć jeden nie wysterylizowany test, który jest kontrolą żywotności drobnoustrojów testowych w danej serii (nie przy każdym badaniu, tylko w momencie rozpoczęcia nowej serii testów biologicznych)
- testy po zakończonym procesie sterylizacji powinny być dostarczone do badania w czasie nie dłuższym niż 24 godziny