

**Postępowanie z biologicznymi wskaźnikami kontroli skuteczności procesu sterylizacji
przed dostarczeniem do laboratorium**

Sporal A - sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu / Sporal S - sterylizacja suchym, gorącym powietrzem

- Przestrzegać szczegółowych zaleceń producenta testów dotyczących warunków przechowywania wskaźników przed użyciem oraz procedury wykonania kontroli procesu sterylizacji ;
- Po zakończeniu procesu sterylizacji wyjąć wskaźniki testowe z załadunku, opisać ich rozmieszczenie w komorze. Wskaźniki zabezpieczyć przed uszkodzeniem (np.: włożyć do koperty lub zawinąć w kartkę papieru) ;
- Wskaźniki dostarczyć do laboratorium w godzinach 8:00 do 11:00

Uwaga : - **do laboratorium dostarczyć wskaźniki poddane sterylizacji zakończonej nie wcześniej niż o godz. 13:30 dnia poprzedniego lub w dniu dostarczenia.**

Przed dostarczeniem do laboratorium wskaźniki poddane sterylizacji należy przechowywać w temperaturze pokojowej.

Dodatkowo dołączyć jeden wskaźnik nie poddany procesowi sterylizacji (wskaźnik kontrolny żywotności drobnoustrojów dla danej serii)

- Wraz z wskaźnikami dostarczyć formularz zlecenia zawierający następujące informacje :

Dane klienta (nazwa i adres klienta ; telefon kontaktowy)

Dane dotyczące sterylizatora (typ, nr fabryczny, rok produkcji, jego lokalizacja)

Parametry procesu sterylizacji (temperatura, czas ,ciśnienie ; data przeprowadzenia sterylizacji)

Data / godzina zakończenia procesu sterylizacji

Dane dotyczące osoby przeprowadzającej sterylizację.