

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK KAŁU DO PODŁOŻA TRANSPORTOWEGO W KIERUNKU NOSICIELSTWA PAŁECZEK Z RODZAJU SALMONELLA/SHIGELLA

Badanie na nosicielstwo pałeczek Salmonella/Shigella do książeczki dla celów sanitarno-epidemiologicznych to badanie trzech próbek kału pobranych z 3 kolejnych dni (po jednej z każdego dnia) na wymazówki z podłożem transportowym.

Podłoża są wydawane bezpłatnie w naszym Laboratorium.




Próbki kału należy pobrać w następujący sposób:

DZIEŃ 1 – wymazówka nr 1

DZIEŃ 2 – wymazówka nr 2

DZIEŃ 3 – wymazówka nr 3

- kał oddać do czystego, wyparzonego wrzątkiem naczynia, można wykorzystać również talerz jednorazowego użytku,
- za pomocą wymazówki pobrać z kilku miejsc stolca porcję kału tak, aby materiał był **wyraźnie widoczny na waciku** (minimum wielkość ziarna kukurydzy),

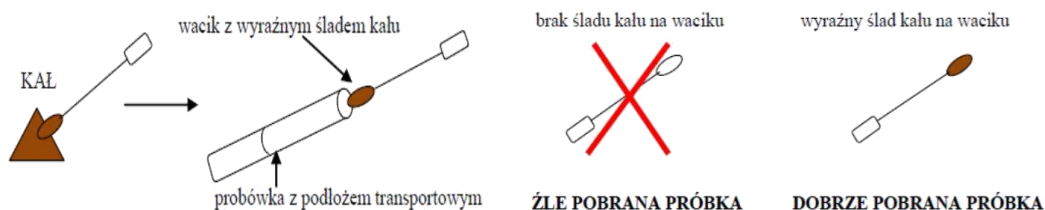

Jeżeli próbka nie będzie zawierała dostatecznej ilości materiału nie zostanie przyjęta.

- wyjąć korek z próbówki z podłożem transportowym, umieścić tam wymazówkę, dokładnie zamknąć, opisać imieniem i nazwiskiem osoby, od której materiał został pobrany oraz datą i godziną pobrania,
- pobrane próbki przechowywać w temperaturze lodówki (2 – 8°C). NIE ZAMRAŻAĆ!
- próbki do badań umieścić w foliowym woreczku i dostarczyć do laboratorium wszystkie razem, najpóźniej w ciągu 72 godzin od daty pobrania pierwszej z nich.

**PRÓBKİ SĄ PRZYJMOWANE OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU
W GODZINACH 8.00-12.00
W PIĄTKI PRÓBEK NIE PRZYJMUJEMY!**

**UWAGA: Nie pobierać kału do badań w trakcie terapii antybiotykami,
ani innymi lekami wpływającymi na florę bakteryjną, oraz przed upływem minimum 7 dni od jej
zakończenia.**

- wypełnić czytelnie i dokładnie „Zlecenie na badania w Sekcji Schorzeń Jelitowych” (dostępne w Laboratorium lub na stronie internetowej PSSE w Koninie),
- **koszt badania wg aktualnego cennika, płatność w chwili oddawania próbek w kasie PSSE,**
- wyniki badania odbiera się po tygodniu osobiście lub przez osobę upoważnioną,
- z wynikami należy udać się do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego.