

**WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BYDGOSZCZY**  
**DZIAŁ LABORATORYJNY**  
**ODDZIAŁ DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ**

Wyciąg z załącznika nr 5 do PL-02/IR-01/LLD wydanie 1 załącznika z dnia 2023-02-27

**1.3. Pobieranie i transport wymazów z odbytu / kału w kierunku wykrywania pałeczek *Enterobacterales* wytwarzających karbapenemazy metodą hodowlaną i krążkowodyfuzyjną**

Wymaz z odbytu / kału pobiera się na wymazówkę z zestawu do podłoża transportowego (do nabycia w Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Bydgoszczy).

**Prawidłowe pobieranie wymazu z odbytu:**

Pobrać wymaz ostrożnie wkładając wymazówkę na głębokość około 1 cm poza zwieracz odbytu i kilkakrotnie obracając. Wymazówkę włożyć do podłoża transportowego (próbówka), dokładnie zamknąć, opisać imieniem i nazwiskiem osoby, od której materiał został pobrany oraz datą i godziną pobrania. Tak pobraną próbkę można przechowywać maksymalnie do 48 godzin w warunkach chłodniczych (2-8 °C±1).