

INSTRUKCJA ZLECANIA MIKROBIOLOGICZNEGO BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO

I. Pobranie materiału:

- udostępnić zainteresowanym druk zlecenia badania laboratoryjnego wraz instrukcją pobierania, przechowywania i transportu materiału do badań
- w przypadku pobrania materiału oznakuj go właściwie: imię i nazwisko pacjenta, data urodzenia /PESEL, data i godzina pobrania próbki

II. Przygotowanie zlecenia badania laboratoryjnego:

1. sprawdź czy wszystkie pola na druku zlecenia zostały wypełnione **czytelnie i drukowanymi literami** (pozwoli to na uniknięcia błędów!)
2. w przypadku pacjenta nieletniego zlecenie wypełnia opiekun prawny, wpisując w odpowiednim polu swoje dane
3. określ cel badania:
 - badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych to badanie osób zdrowych w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella-Shigella oraz wszystkie badania wykonywane w ramach działalności statutowej Inspekcji Sanitarnej
 - badanie diagnostyczne to badanie płatne osób z objawami nieżytu żołądkowo-jelitowego,

III. Zleceniodawca:

- w rubryce „Zleceniodawca” (2 kolumna w 1 wierszu zlecenia) wpisz nazwę, adres, **numer telefonu i adres e-mail**,
- w polu „data zlecenia i podpis zleceniodawcy” podpis składa osoba odpowiedzialna za przyjęcie próbek od pacjenta i przekazanie ich do właściwego Oddziału Laboratoryjnego (podpis jest poświadczeniem sprawdzenia danych w druku zlecenia)
- przygotuj listę badanych osób/wykaz przekazywanych próbek
- zaznacz symbolem rodzaj wirusów (rota-/adenowirusy, norowirusy), dla których ma być wykonane oznaczenie (*jeśli dotyczy*)

IV. Transport i przechowywanie:

- przechowuj pobrane próbki w temperaturze zgodnej z instrukcją laboratorium
- zabezpiecz próbki przed ewentualnym skażeniem
- dostarcz próbki do laboratorium monitorując temperaturę transportu

V. Sposób postępowania z próbką w laboratorium

- próbka dostarczona do laboratorium oceniana jest pod kątem jej przydatności do badań – sprawdzeniu podlegają:
 - stan próbki tj. szczelność pojemnika (kałówki/wymazówki z podłożem transportowym), ilość materiału w pojemniku (kałowce), konsystencja próbki, obecność materiału na waciku wymazówki; data i godzina pobrania próbki
 - zgodność zapisów na próbce i w dołączonej dokumentacji
- w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na etapie przyjęcia próbki do badań powiadamiany jest o tym fakcie Zleceniodawca
 - próbka, która nie nadaje się do badania (nie spełnia wymagań określonych w instrukcji pobierania, przechowywania i transportu materiału do badań) podlega utylizacji
 - w przypadku, gdy próbka nadaje się do badania, lecz brak jest odpowiednich danych w dokumentacji należy je uzupełnić (uzupełnia Zleceniodawca lub uprawniony pracownik laboratorium)
- próbka rejestrowana jest w systemie elektronicznym w zależności od kierunku badania oraz oznakowana poprzez nadanie unikalnego kodu wg schematu: symbol laboratorium/symbol obszaru badań /kolejny numer w rejestrze/dwie ostatnie cyfry bieżącego roku.

INSTRUKCJA POBRANIA I TRANSPORTU PRÓBEK KAŁU W KIERUNKU NOSICIELSTWA PAŁECZEK Z RODZAJU SALMONELLA/SHIGELLA

**Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych obejmuje
trzy próbki kału zebrane z trzech kolejnych dni na wymazówki z podłożem
transportowym.**

**UWAGA: Kału nie należy pobierać w trakcie terapii antybiotykowej oraz przed
upływem min. 7 dni od jej zakończenia.**

1. Kupić trzy wymazówki z podłożem transportowym
2. Próbki pobrać według następującego schematu:

Próbki kału do badania na nosicielstwo pałeczek
Salmonella-Shigella należy pobierać
w trzech kolejno po sobie następujących dniach.



Próbki pobrać według następującego schematu:

DZIEŃ 1 – wymazówka nr 1	DZIEŃ 2 – wymazówka nr 2	DZIEŃ 3 – wymazówka nr 3
• kał oddać do czystego, wyparzonego wrzątkiem naczynia, można wykorzystać również talerz jednorazowego użytku • za pomocą wymazówki pobrać z kilku miejsc stolca porcję kału tak, aby materiał był wyraźnie widoczny na waciku. KAL wacik z wyraźnym śladem kału próbówka z podłożem transportowym brak śladu kału na waciku ŹLE POBRANA PRÓBKA wyraźny ślad kału na waciku DOBRCZE POBRANA PRÓBKA • jeżeli próbka nie będzie zawierała dostatecznej ilości materiału nie zostanie przyjęta. • wymazówkę włożyć do próbki z podłożem transportowym, dokładnie zamknąć, opisać imieniem i nazwiskiem osoby, od której materiał został pobrany oraz datą i godziną pobrania. • pobrane próbki przechowywać w temperaturze lodówki (2 – 8°C). NIE ZAMRAŻAĆ! • wymazówki do badań umieścić w pojedynczym przezroczystym foliowym woreczku i dostarczyć do laboratorium wszystkie razem trzeciego dnia (najpóźniej czwartego).		