

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Laboratorium Epidemiologii
70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7
tel. 462-40-60 wew.107

POBIERANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT PRÓBEK Z BIOLOGICZNYMI WSKAŹNIKAMI KONTROLI SKUTECZNOŚCI STERYLIZACJI

Przeprowadzenie kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu:

- Próbkę stanowi biologiczny wskaźnik w formie bibuły nasyczonej zawiesiną spor szczepu *Bacillus*, który służy do przeprowadzenia kontroli procesu sterylizacji na suche gorące powietrze.
- Wskaźniki należy umieścić wewnątrz urządzenia w miejscu najtrudniej dostępnym dla czynnika sterylizującego. Ilość użytych wskaźników zgodna z instrukcją producenta testów.
- Przeprowadzić ustalony program sterylizacji, parametry (temperatura i czas) zależą od zastosowanej technologii.
- Po zakończeniu procesu wyjąć wskaźniki testowe i w czasie nie dłuższym niż 24 godziny dostarczyć do Laboratorium.
- Do badanej próbki należy dołączyć wskaźnik kontrolny nie poddany procesowi sterylizacji (tej samej serii, co badany test).
- Używane testy powinny mieć aktualną datę ważności.
- Testów nie należy otwierać i wyjmować z opakowania papierowego.
Do badanej próbki należy dołączyć: „Zlecenie na badanie laboratoryjne testów kontroli sterylizacji”.

Sposób przechowywania i transport próbek do Laboratorium:

Po zakończeniu procesu sterylizacji próbki wraz ze wskaźnikiem kontrolnym należy dostarczyć z wypełnionym „Zleceniem na badanie laboratoryjne testów kontroli sterylizacji” do Rejestracji Medycznej WSSE. Przy braku możliwości dostarczenia wskaźników bezpośrednio po sterylizacji, należy je przechować zgodnie z instrukcją producenta.

W czasie transportu pobranych próbek należy zwrócić uwagę, aby nie doszło do uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej koperty ani jej przemoczenia.